

NOWOŚĆ



Płyn do testowania mleka MLEKO Test

 **CanAgri**
Wyhoduj większy zysk

MLEKO Test

MLEKO TEST - Płyn do testowania komórek somatycznych w mleku.

Płyn diagnostyczny pozwalający na samodzielną kontrolę i ocenę stanu zdrowotnego wymion na długo przed pojawieniem się widocznych zmian jakościowych mleka tzn. kłaczków, krwi i wodnistości itp.

*** 8% VAT**



Zalecane stosowanie:

1. Zdoić pierwsze strugi mleka.
2. Pobrać po 2 ml mleka z każdej ćwiartki i umieścić na odpowiednich miejscach płytki do testowania.
3. Dodać po 1 ml preparatu MLEKO TEST.
4. Zamieszać delikatnie.
5. Dokonać odczytu.

Odczyt:


- I. Mleko pozostaje niezmiennie płynne
 - negatywny (-) <100000 - 200000 komórek/ml
- II. Widoczne smugi i przebarwienia
 - słabo pozytywny (+) <200000 - 500000> komórek/ml
- III. Widoczne śluzowacenie mleka i czerwone zabarwienia
 - pozytywny (++) <500000 - 1500000> komórek/ml
- IV. Żelowanie mleka (galaretowanie) oraz mocno czerwone
 - silnie pozytywny (+++) >1500000 komórek/ml



Niezawodny i szybki sposób określania zawartości komórek somatycznych w mleku.

Test jest bardzo czuły – zmienia się barwa i konsystencja mieszaniny.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Płyn do testowania mleka MLEKO Test 500 ml	01-5447	1/18/864
Płyn do testowania mleka MLEKO Test 1000 ml	01-5448	1/10/560